

Gesichtsschutzmaske

mit austauschbarem Visierschild – Gebrauchsanleitung



- Artikelnummer:** 2001
- Produktbezeichnung:** Visiermaske mit austauschbarem Visierschild
- Vertrieb:** strohmeyer dialog.druck GmbH
Hundsrückstraße 6, 37287 Wehretal, Telefon 05651/9799-0
- Inhalt:** Visierhalterung aus ABS-Kunststoff
Stirnpolster aus PE-Schaum, einseitig selbstklebend
Gummiband aus Elasthan
Visier aus PET-Folie, glasklar
- Anwendungshinweise:** Für alle Bereiche des öffentlichen Lebens geeignet.
Getestet als Schutz gegen Tropfen und Spritzer von Flüssigkeiten.
Visierfolien können nach Bedarf ausgewechselt werden.
- Aufbewahrung:** Ohne direkte Sonneneinstrahlung, in Originalverpackung trocken lagern.
- Dermatologische Verträglichkeit:** Es ist nicht bekannt, dass die verwendeten Komponenten und Materialien für den Benutzer schädlich sein können. Allergische Reaktionen bei direktem Hautkontakt sind jedoch nicht auszuschließen.
- Sicherheitshinweis:** Nicht für die folgenden Zwecke geeignet:
- zum Schutz gegen mechanische Einwirkung
 - zum Schutz gegen brennende, sich zersetzende oder durch chemische Wirkung auflösende Stoffe wie Säuren, Lichtquellen, Gase oder Dünste jeglicher Art
 - gegen Funken, Bestrahlung oder ultraviolette Strahlen
 - beim Rauchen oder während jeglicher Tätigkeiten mit oder in der Nähe von Flammen oder wärmespendenden Geräten
- Entsorgung:**
- Das Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden.
 - Bei kontaminierten Produkten sind die Art und das Ausmaß der Kontamination ausschlaggebend für die Entsorgung. Die geltenden Gesetze und Bestimmungen sind zu beachten.

Aufbauanleitung:

<p>1. Stirnpolster Schutzfolie von der Klebefläche des Stirnpolsters entfernen. Das Stirnpolster entlang der Innenseite des Visierhalters ankleben.</p> 	<p>2. Gummiband Führen Sie folgende Schritte an beiden Seiten des Visierhalters aus: Gummiband von unten in das mit ,1' gekennzeichnete Loch einfädeln.</p>  <p>Gummiband in das mit ,2' gekennzeichnete Loch einfädeln</p> 	<p>3. Visierfolie Bitte beachten Sie, dass die L / R Kennzeichnung auf dem Visierhalter nach oben zeigt. Die Visierfolie auf die vorgesehenen Pilzzapfen nacheinander aufklipsen.</p> 
--	---	--

Haftungsausschluss

In Fällen einer nicht bestimmungsgemäßen oder nicht sachgerechten Verwendung des Produkts übernimmt die HAWICO UG (haftungsbeschränkt) keine Haftung. Auswahl und Nutzung des Produkts liegen in der ausschließlichen Verantwortung der handelnden Personen. Produkthaftungsansprüche, Gewährleistungsansprüche und Ansprüche aus etwaigen von der HAWICO UG (haftungsbeschränkt) für dieses Produkt übernommenen Garantien verfallen, wenn es nicht entsprechend der Gebrauchsanleitung eingesetzt wird.